

Baxter

届出番号：13B1X90001000001

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

CAPDカテーテルケアキット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、医療ガーゼと綿棒で構成されたキット製品です。

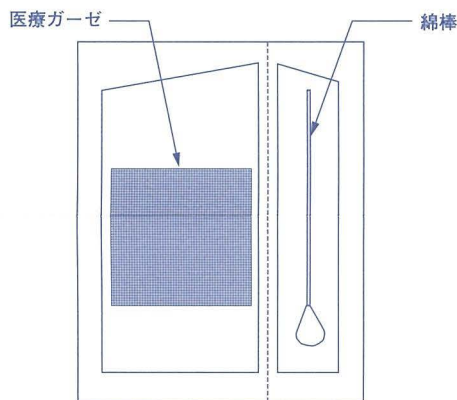

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みです。

【使用目的又は効果】

腹膜透析患者における腹膜透析用カテーテルの出口部皮膚を、感染予防のために汚染から保護し、清潔に保つことを使用目的とします。

【使用方法等】

1. 綿棒とガーゼの入った包装をそれぞれ点線より分けます。
2. 綿棒を包装から取り出し、消毒液をしみ込ませます。
3. 綿棒を用いてカテーテル出口から外側周辺に向けて皮膚を消毒し、よく乾燥させます。
4. ガーゼを包装から取り出し、清潔操作にて、出口部にテープなどで固定します。
5. 使用済みの綿棒を捨てます。

**<使用方法等に関連する使用上の注意>

使用にあたり、以下の内容を患者に指導して下さい。

1. 開封前に包装に破れ、傷、汚れがないことを確認すること。
2. 本品に変色、ヒビ、変形、劣化、破損があった時は使用しないこと。
3. 包装開封後直ちに使用すること。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

使用にあたり、以下の内容を患者に指導して下さい。

汚染した可能性のある本品を使用した場合は、使用を中止し医療機関の指示に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

室温にて保管して下さい。

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

**2. 有効期間等

滅菌日より3年間

使用期限は包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売元

バイリーンクリエイト株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地五丁目6番4号

電話番号：03-4546-1183

製造元

パシフィック技研株式会社

*発売元

バクスター株式会社

電話番号：03(6204)3700

製造販売元

バイリーンクリエイト株式会社

東京都中央区築地五丁目6番4号

発売元

バクスター株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号