



1076

**2017年7月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

*2013年2月改訂（第3版）

コード番号 JPC4222

Baxter

承認番号 20200BZY00463000

機械器具7. 内臓機能代用器
高度管理医療機器 腹膜灌流用回路及び関連用具セット 70592000

CAPD UVフラッシュセット (UVフラッシュディスクコネクタキット)

再使用禁止

【警告】


ディスクコネクタキャップの内部を汚染させないこと。[腹膜炎を
発症することがある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*本品はUVフラッシュディスクコネクタ接続チューブ（以下、「接続
チューブ」という）の先端の汚染を防止するためのキットである。
本品はUVフラッシュディスクコネクタキャップ（ディスクコネク
タキャップ及び保護キャップ）とマスクから構成されている。

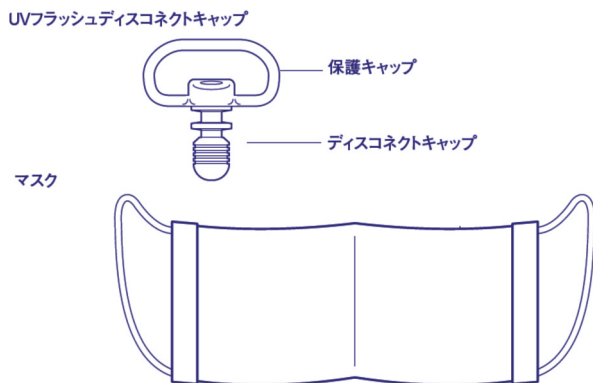

**本キャップは、ガンマ線滅菌済みで（保護キャップで無菌性を保
証）、回路内に発熱性物質を含有しない。

【使用目的又は効果】

慢性腎不全患者の自己連続携帯式腹膜透析（CAPD）施行の際の、
透析液注排液用 Disposableセットとして使用する。

【使用方法等】

外し方

1. ディスクコネクタキャップが装着された接続チューブをUVフラッシュ
セットの左溝にセットする。
2. UVフラッシュセットの右溝に適切な器材をセットする。
3. UVフラッシュセットの操作方法に従い接続チューブからディス
コネクタキャップを取り外す。
4. UVフラッシュセットから本品を取り出し捨てる。

付け方

1. 本品の包装を開封し、マスクを着用する。
2. UVフラッシュディスクコネクタキャップの包装を開封し、UVフ
ラッシュディスクコネクタキャップを取り出す。
- *3. UVフラッシュセットのフタを開け、左溝に適切な器材をセット
する。
4. UVフラッシュセットの右溝にUVフラッシュディスクコネク
タキャップをセットし保護キャップを外す。
5. UVフラッシュセットのフタを閉じる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

**使用にあたり、以下の内容で患者に指導を行うこと。

- *1. 本品とUV接続チューブを接続するときは「UVフラッシュセ
ット」を必ず用いること。
2. 接続チューブのスパイクの汚染をさけるため、ディスクコネク
タキャップが確実に接続チューブのスパイクを覆っていることを
確認すること。

**【組み合わせて使用する医療機器】

「UVフラッシュセット」（承認番号20900BZZ00283000）

「CAPD UVフラッシュセット」（承認番号20200BZY00463000）

UVフラッシュ接続チューブ

UVフラッシュディスクコネクタ接続チューブ

「ホームAPDシステム ゆめセット」（承認番号20400BZY01282000）

UVフラッシュ5バッグ用セット

UVフラッシュ4バッグ用少注流量セット

「CAPDディスクコネクタYシステム」（承認番号20900BZY00204000）

UVフラッシュディスクコネクタYセット

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

**使用にあたり、以下の内容で患者に指導すること。

- **1. 汚染した可能性のある本品を使用した場合や、接続部から液漏
れ、接続部の抜けが発生した場合は、注排液をせず、すみやか
に医療機関に連絡し、医師の指示に従うこと。[透析液の接する
部分が汚染されると腹膜炎になるおそれがある。]
- **2. 本品の切り離し及び接続操作は、清潔な環境下で清潔操作によ
り行うこと。
- **3. 本品には殺菌消毒剤（アルコール、過酸化水素水、アルコール
を含んだ消毒剤等）を使用しないこと。
4. 開封前に包装に破れ、傷、汚れがあったり、保護キャップが外
れていた場合には本品を使用しないこと。
5. 本品に変色、ヒビ、変形、劣化及び破損があった場合は使用し
ないこと。
6. 包装開封後直ちに使用すること。再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

室温保管

****2. 使用期限等**

使用期限は包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者（輸入元）：

バクスター株式会社

*電話番号：03（6204）3700

製造業者：

バクスターヘルスケア社（アメリカ合衆国）

Baxter Healthcare Corporation

Baxter、U.V.Flash Auto及びゆめはバクスターインターナショナルインクの登録商標です

製造販売元（輸入元）

バクスター株式会社

SW-30-01-076