

Baxter

Infusor

AMBULATORY SYSTEMS

Infusor

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ



バクスターインフューザー、インターメイトは、
合成ゴムから作られたバルーン式薬液リザーバーと、
流量を制御する管から出来た携帯型ディスプレイ注入ポンプです。

製品特長

優れた携帯性

小型かつ軽量なので装着時の違和感や束縛感がほとんどなく、患者さんの行動・日常生活も制限されません。

目立たない

バルーンリザーバーの収縮で駆動するため、駆動音や警告音で睡眠が妨げられたり、他人に気づかれる事なく治療が行えます。

不正使用の防止

投与される薬液量は、製品の選択と薬液の濃度によって調節されます。一度充填された薬剤は製品から取り出す事ができませんので、薬剤のコントロールは医療従事者によってのみ行われ、第三者による薬剤の不正使用を未然に防ぎます。

シンプル


点滴ポールや電源コードの必要がありません。又、流速は流量制御管の内径の違いによって設定されていますので、難しいプログラミングの必要もありません。流速および充填量の異なる製品群より、治療方針に合わせて注入時間の幅広い選択が可能です。

安定した流速

投与開始から終了まで安定した流速を提供いたします。



■ LV5 (5mL/hr) の流速推移 (5%ブドウ糖注射液31.1℃設定)

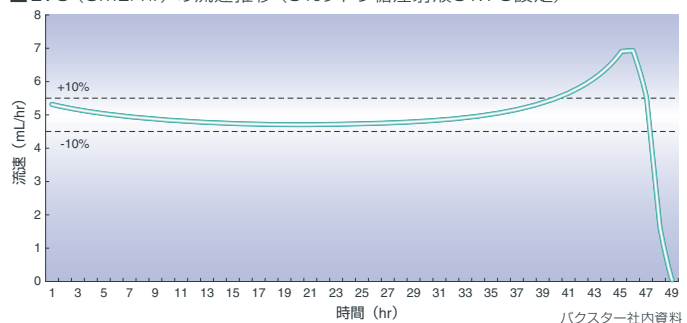

バクスターインフューザー SVシリーズ (ボトルタイプ) ・ LVシリーズ

承認番号：16300BZY00986000

コード番号	製品名	規定充填量	残液量	公称流量	規定注入時間	公称充填量 (最大充填量)	最小充填量	包装単位
J2C1701	バクスターインフューザー SV1	96mL	約 1mL	1mL/hr	96時間	97mL	86mL	12個
J2C1702	バクスターインフューザー SV2	96mL	約 1mL	2mL/hr	48時間	97mL	86mL	12個
J2C1711	バクスターインフューザー SV2.5	120mL	約 1mL	2.5mL/hr	2日	130mL	108mL	12個
J2C1008	バクスターインフューザー LV2	240mL	約 3mL	2mL/hr	120時間	300mL	216mL	12個
J2C1009	バクスターインフューザー LV5	240mL	約 3mL	5mL/hr	48時間	300mL	216mL	12個
J2C1063	バクスターインフューザー LV10	240mL	約 3mL	10mL/hr	24時間	300mL	216mL	12個

インターメイト

承認番号：20600BZY00035000

コード番号	製品名	規定充填量	残液量	公称流量	規定注入時間	公称充填量 (最大充填量)	最小充填量	包装単位
2C2112K	インターメイト LV50	250mL	約 3mL	50mL/hr	5時間	275mL	225mL	24個

附属品



輸液セット (LV充填セット)

承認番号：21300BZZ00485000

(別売り)

製造販売元 フォルテ グロウ メディカル株式会社
栃木県佐野市大橋町 1647
発売元 バクスター株式会社



携帯用メッシュポーチ

(製品梱包とは別に用意しております)



(SV用)



(LV用)

携帯用ポーチ

(製品梱包とは別に用意しております)

製造販売元

バクスター株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号

www.baxter.co.jp

問い合わせ先

バクスター株式会社

ホスピタルプロダクト事業部

部門代表電話番号：03-6894-3010

2020年5月作成

JP/35/20-0006