


フロシール（Fast Prep キット） 調製方法

販売名：フロシール（承認番号：22600BZX00074000）



構成内容

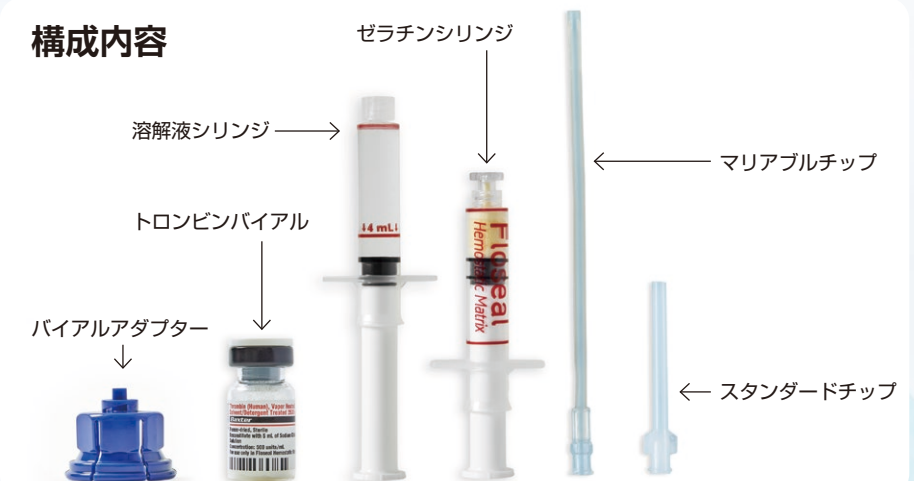

1 溶解液シリンジのキャップを外し、
バイアルアダプターと接続する。



2 接続したバイアルアダプターを
トロンビンバイアルに垂直に差し込む。




3 トロンビンバイアルをゆっくりと回転させ、
トロンビンを完全に溶解させる。
バイアルを激しく振ると溶液が泡立つので
注意する。




4 バイアルアダプターに接続した
溶解液シリンジを1/4程度ゆるめ圧を逃がし、
再び締め直す。




5 トロンビン溶液を溶解液シリンジの
赤い線まで吸引する。
5mLキットの場合は、4mLの線まで
10mLキットの場合は、8mLの線まで

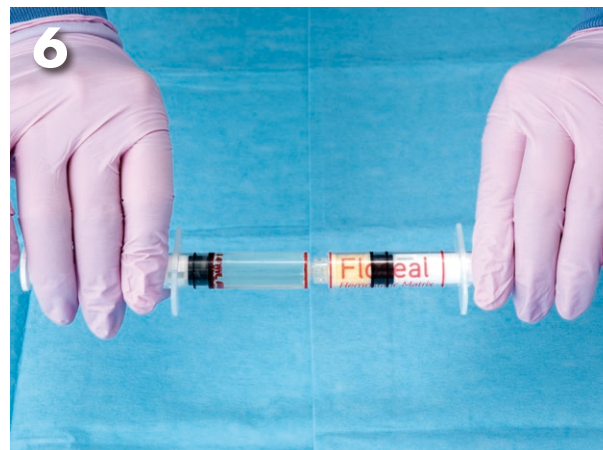

6 ゼラチンシリンジのキャップを外し、
トロンビン溶液を充填したシリンジと接続する。
強く締めすぎると、接続部分を破損する
恐れがあるので注意する。

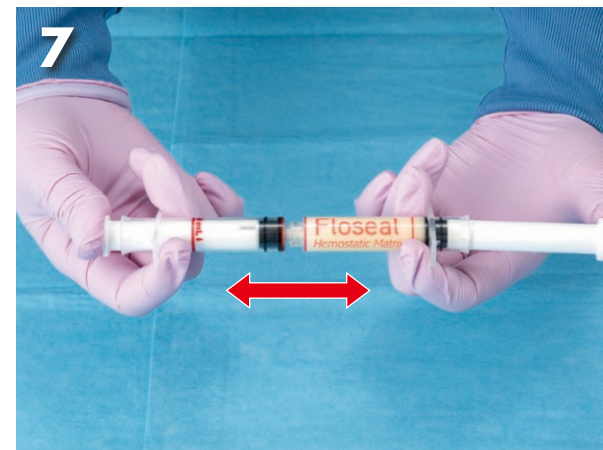

7 双方のシリンジの内筒を交互に押し、
混合物を双方のシリンジ間で
少なくとも10往復する。
混合不良を避けるため、
内筒を素早く最後まで押しきる。

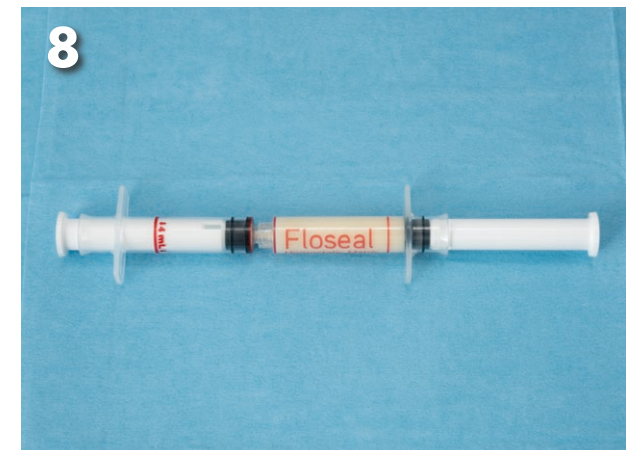

8 調製後、少なくとも30秒間待ってから使用する。
使用前の乾燥を防ぐため、使用するまで
シリンジを接続したままにする。
混合した後、8時間まで使用可能。