


## 臨床工程・回収工程

オペレーションガイドに従い「CRRT」の臨床工程・回収工程を実施する。  
(KM-9000取扱説明書 操作編参照)

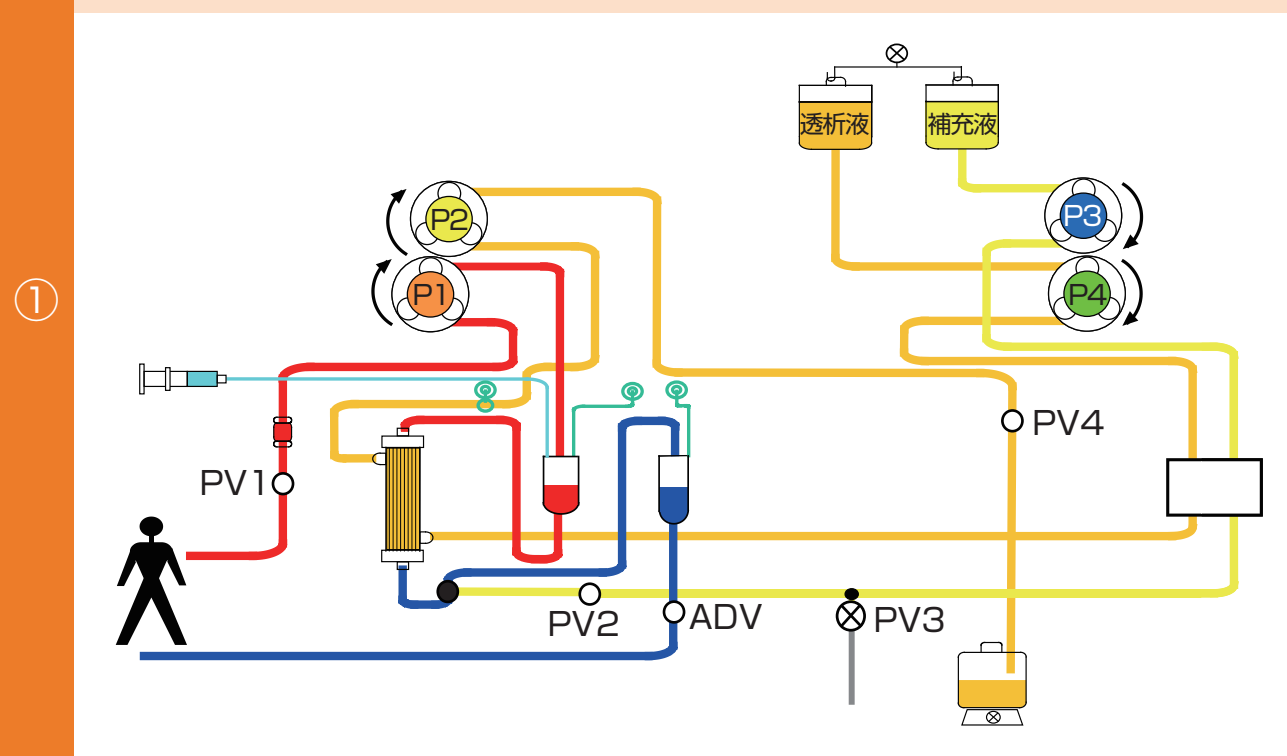

## 注意事項 セプザイリス60の洗浄について

- セプザイリス60(有効膜面積0.6m<sup>2</sup>)をご使用される際には、血液浄化用血液回路K-HP-90CFPを使用し、用途選択画面にて使用回路「細径回路」を選択して、回路装着・確認工程・洗浄工程を実施してください。
- 洗浄工程中のポンプ停止時に、ポンプ停止の反動により「入口圧異常」「返血圧異常」のアラームが表示される場合があります。  
その際には、右側の透析液・補充液ポンプカバーを開放して圧を逃がしてください。ポンプカバーを閉じた後、[スタート]スイッチを押し、洗浄工程を継続してください。

**Baxter**

バクスター株式会社  
〒104-6009 東京都中央区晴海1丁目8番10号  
トリトンスクエア オフィスタワーX 9階  
TEL: 03(6204)3700

販売元:バクスター株式会社  
販売名:セプザイリス  
特定保険医療材料名称:持続緩徐式血液濾過器②特殊型  
医療機器承認番号:22500BZX00401000  
クラス分類:高度管理医療機器(クラスⅢ)

**川澄化学工業株式会社**

〒108-6109 東京都港区港南2-15-2  
品川インターシティB棟 9階  
TEL: 03(5769)2600

販売元:川澄化学工業株式会社  
販売名:血液浄化用装置 KM-9000  
医療機器承認番号:22000BZX00121000  
クラス分類:高度管理医療機器 特定保守管理医療機器  
製造販売元:山陽電子工業株式会社



川澄化学工業株式会社

## 血液浄化用装置KM-9000で セプザイリス使用時の洗浄方法


### 準備物品リスト

| 準備品                                  | 数 量    |
|--------------------------------------|--------|
| セプザイリス                               | 1本     |
| "血液浄化用血液回路 K-HP-90CF または、K-HP-90CFP" | 1セット   |
| "生理食塩液等の電解質溶液(洗浄・プライミング用)"           | 3000mL |
| "生理食塩液(緊急輸液ライン充填用、回収用)"              | 500mL  |
| 抗凝固剤                                 | 必要量    |
| 抗凝固剤用シリンジ                            | 必要量    |
| 鉗子                                   | 5本以上   |
| 廃液受け容器                               | 1個     |


※詳細は、必ず「KM-9000」取扱説明書および「セプザイリス」の添付文書を参照し、適切な方法で施行すること。

### 回路装着・確認工程

用途選択で「CRRT」を選択。  
オペレーションガイドに従い回路装着を行う。

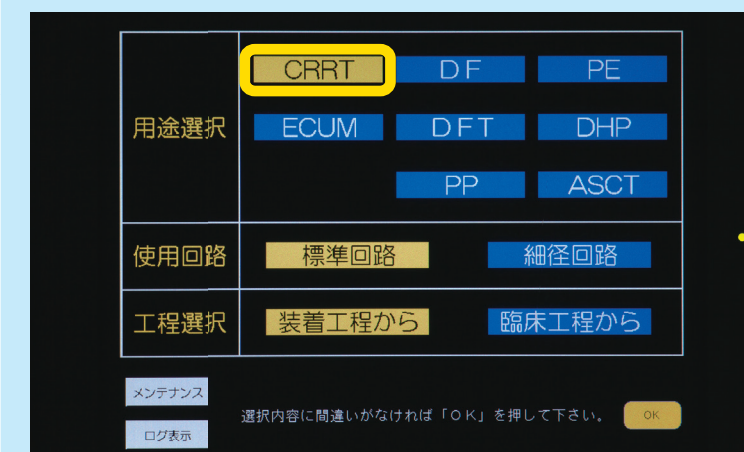

【注意】セプザイリスのカプラは、特殊(ネジ切り)構造のため、回路を奥までしっかりと押し込む。  
(この隙間からエアの吸い込みや液垂れを起こしリークテスト不合格になる)

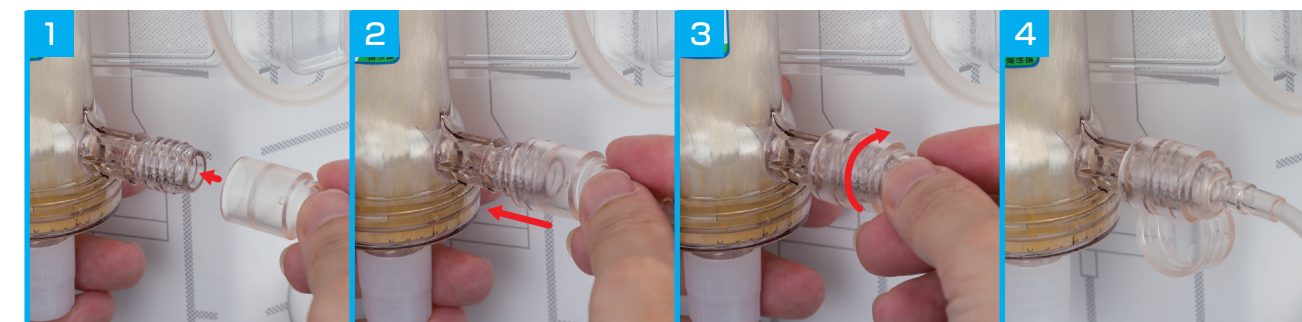




洗浄工程


オペレーションガイドに従い、洗浄工程準備を実施する。  
※洗浄工程準備ガイダンスにある「洗浄用生食」は、「抗凝固剤を添加した生理食塩液等の電解質溶液」に読み替える。その後、オペレーションガイドに従い、洗浄を開始する。

①

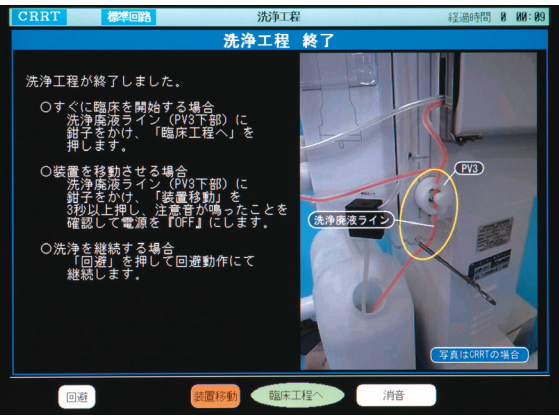


回避動作による血液側の追加洗浄(1000mL)  
洗浄工程のディスプレイの過程表示が「抗凝固剤添加生食による洗浄」となり、「B15抗凝固剤添加生食接続」アラームが鳴り、ポンプが停止したら、ディスプレイ左下部に表示される[回避]スイッチを押し、回避動作に移行する。

②

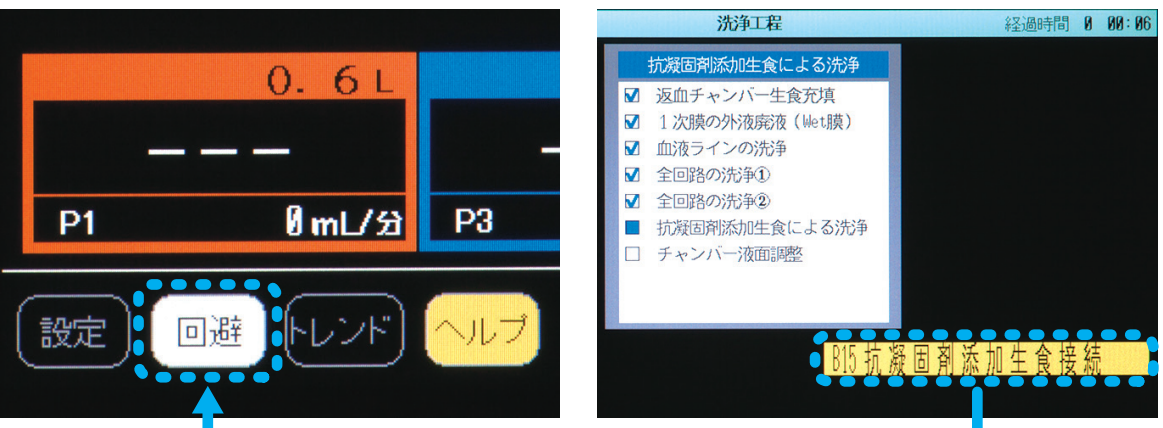


画面上の[PV2]スイッチを押しPV2を閉める。  
※任意操作部の[PV2]、[PV3]、[液切れ緑]、[返血液面]が黄色表示となっていることを確認。

③

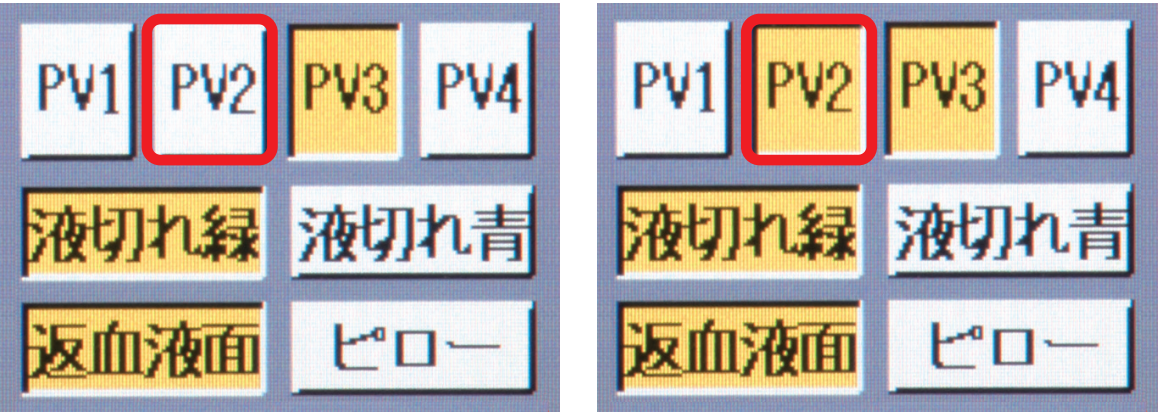


[スタート]スイッチを押し、血液ポンプ(P1ポンプ)流量調節器により作動させる。(流速は150mL/min以下)  
血液ポンプ(P1ポンプ)の積算表示が「1.0L」となったら、[ストップ]スイッチを押す。  
※回避動作に移行したときに、積算表示が「0.0L」になる。自動動作に復帰したときに、回避動作移行前の積算表示値に戻る。

④

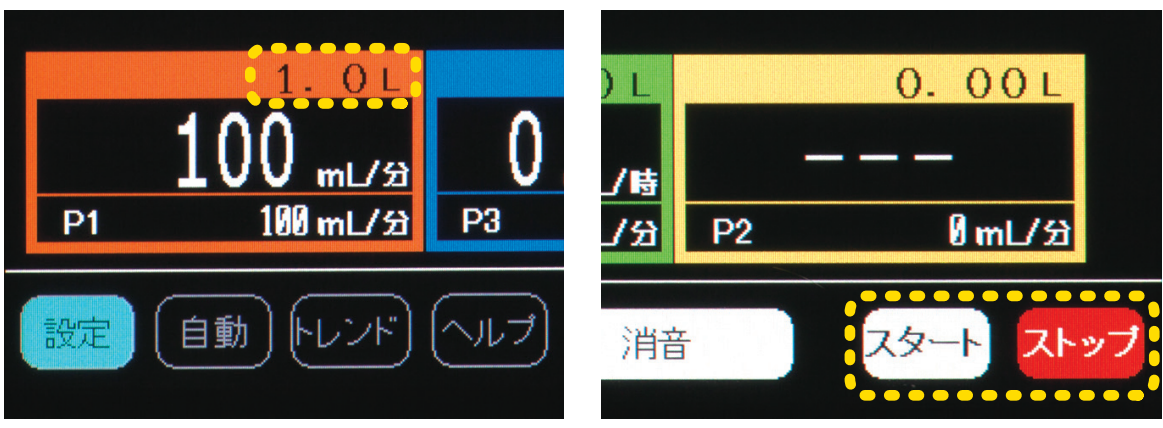

ディスプレイ左下部に表示される[自動]スイッチを押し、自動動作に移行する。再度、「B15抗凝固剤添加生食接続」アラームが鳴るので、[消音]スイッチを押す。

⑤

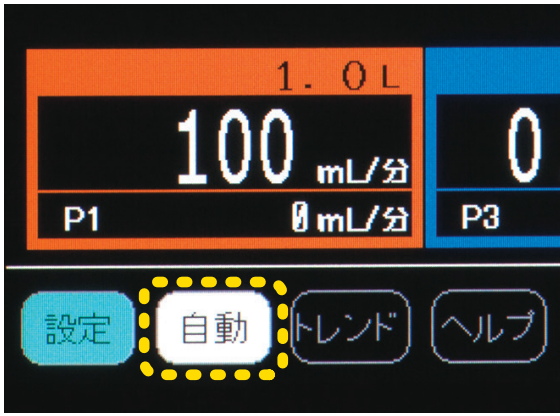

自動動作(再開)(約500mL)  
[スタート]スイッチを押し、自動洗浄を継続する。  
洗浄終了後は、オペレーションガイドに従い操作を実施する。

⑥

